

Whitacre-Kanüle mit Führungskanüle von VYGON

Spinalkanüle mit atraumatischen Pencil-Point-Schliff und passender Einführkanüle



Anzahl pro VE

20 Stück

Klassische Spinalkanüle mit Führungskanüle für die Lumbalpunktion oder Regionalanästhesie

SSB

Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

| Kanüle Lmm | Kanüle in G | Kanüle Ømm | Farbcode | Art.-Nr. | PZN |
|------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| 90 | 27 | 0,42 | grau | 181.041 | 00859900 |
| 90 | 25 | 0,53 | orange | 181.051 | 00862747 |
| 90 | 26 | 0,47 | braun | 181.941 | 00864002 |

Whitacre-Kanüle mit Führungskanüle

Die **VYGON Whitacre-Kanüle** (auch als Pencil-Point-Kanüle bezeichnet) ist eine klassische Spinalkanüle von besonders hoher Qualität. Die punktgeschliffene Kanülenspitze mit seitlicher Öffnung reduziert das Risiko des postspinalen Kopfschmerzes. Aus biegesteifen Edelstahl gefertigt bietet sie die notwendige Formstabilität einer sicheren Liquorpunktion. Auch bei schwierigen anatomischen Gegebenheiten läuft die Kanüle hierdurch gerade und zielsicher durch Gewebe und Rückenmarkshäute. Der dicht schliessende Edelstahlmandrin verhindert die Verschleppung eines Hautzylinders in den Subarachnoidalraum. Die Entfernung des passgenauen Mandrins zum Ende der Punktion unterstützt die Aspiration von Liquor. Dieser kann in dem transparenten Kanülenansatz mit Lupenfunktion gut gesehen werden. Das Erkennen einer erfolgreichen Punktion, durch Lagebestimmung der Nadelspitze, ist hierdurch schnell und sicher möglich.



Die **aus Edelstahl gefertigte Führungskanüle** bietet bei der Liquorpunktion eine besonders hohe Stabilität für die Spinalkanüle. Die Innenform des Kanülenhubs-/ansatzes ist trichterförmig und geht kantenlos in den Kanülenschaft über. Das bei herkömmlichen Führungskanülen oftmals vorhandene Risiko, dass sich die dünne Spinalkanüle in der Führungskanüle verhakt und hierdurch die Spitze geschädigt oder die Kanüle verformt wird, besteht somit nicht.

Im Überblick:

- klassischer Spinalkanülenschliff in Whitacre-/Pencil- Point-Form zur Vermeidung des postspinalen Kopfschmerzes
- biegesteife Kanüle für eine sichere Liquorpunktion
- dicht schliessender Edelstahlmandrin verhindert die Verschleppung eines Gewebeausstichs in die Tiefe des Stichkanals
- transparenter Kanülenansatz der Spinalkanüle zur frühzeitigen Kontrolle des Liquoraustritts
- mit beiliegender besonders stabiler Führungskanüle

Spezifikationen

| Kanüle | | | Farbcode | Führungskanüle | Art.-Nr. | VE |
|--------|------|------|----------|----------------|----------|----|
| G | L mm | Ø mm | | | | |
| 27 | 90 | 0,42 | grau | ✓ | 181.041 | 20 |
| 26 | 90 | 0,47 | braun | ✓ | 181.941 | 20 |
| 25 | 90 | 0,53 | orange | ✓ | 181.051 | 20 |